

## 6. Инструкции по эксплуатации

**1. Включение и выключение:** после включения питания коснитесь кнопки "On/off", чтобы включить или выключить свет, загорится мягкий голубой свет.

**2. Подстройка яркости:** нажмите кнопку "Настройка яркости", чтобы выбрать один из уровней, цифровой дисплей изменится соответственно уровню;

**3. Настройка цветовой температуры:** нажмите кнопку "Настройка цветовой температуры" для выбора одной из трех настроек.

**4. Выбор режима.** Нажмите кнопку "выбор режима" для переключения между желтым (анти-полимеризация) и белым светом. В этом режиме нельзя настроить цветовую температуру. Нажмите кнопку "Настройка цветовой температуры" для возврата в обычный режим. Теперь можете настроить температуру;

**5.** Устройство имеет функцию памяти яркости, при включении устанавливается значение яркости, сохраненное при последнем выключении светильника или отключении электричества.


**6.** Снятие рукоятки. Нажмите кнопку внутри рукоятки и потяните наружу, теперь ее можно легко снять для очистки и дезинфекции.

## 7. Обслуживание и меры предосторожности

1. Неглянцевые поверхности можно очистить воздухом из пистолета, или влажными салфетками;


2. Прозрачный экран можно очистить салфеткой для оптики (не протирайте грубой тканью, она может поцарапать поверхность).

## 8. Аксессуары

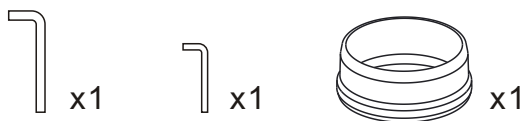

Внимание: никакие поверхности светильника нельзя протирать коррозионными жидкостями!

# Стоматологический LED светильник Инструкция по эксплуатации

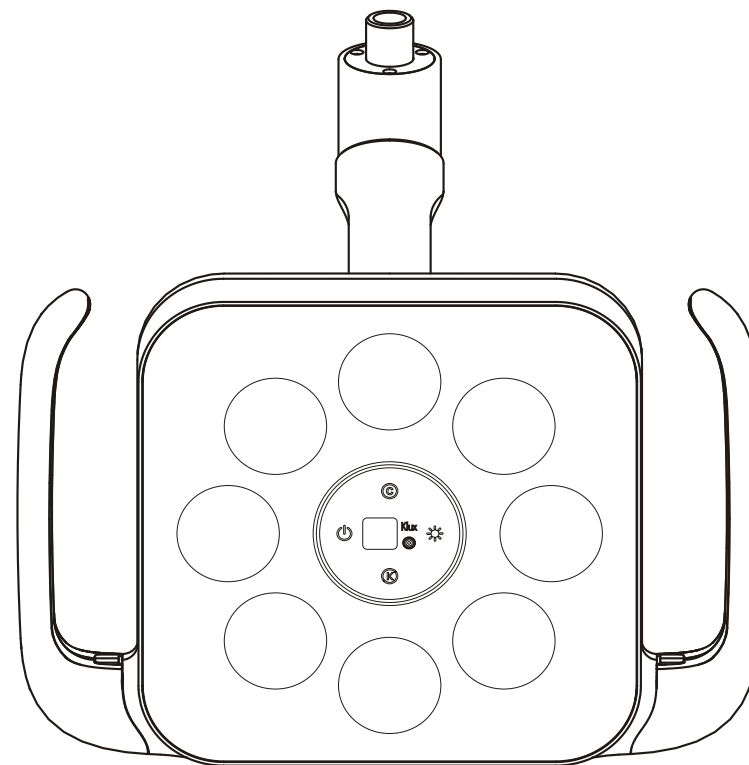

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием!

Перед использованием продукта внимательно прочитайте данную инструкцию, сохраните для последующих обращений. Строго соблюдайте рабочие инструкции, выполняйте очистку и обслуживание согласно методам, указанным здесь.

В случае неисправности оборудования своевременно обратитесь к дилеру или производителю.

**Меры безопасности:** при использовании оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы снизить риски повреждения оборудования, пожара, удара током и травм: перед очисткой и обслуживанием оборудования отключайте его от сети питания, не кладите и не вешайте другие предметы на светильник, не используйте провода, не соответствующие требованиям, это может привести к повреждению оборудования, возгоранию и поражению током.


Во избежание риска удара током не разбирайте светильник самостоятельно. Если нужен ремонт, обратитесь к специалистам.

**Не используйте устройство под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать повреждения, неисправности или перегрева.**


## 1. Область применения

Данный продукт используется в стоматологических кабинетах для освещения полости рта пациента.

## 2. Структура продукта

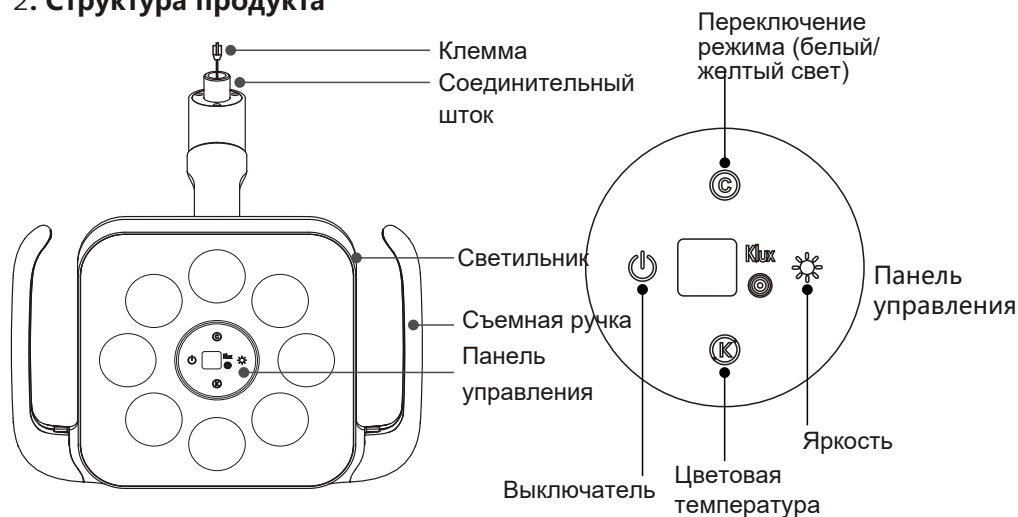

## 3. Монтаж

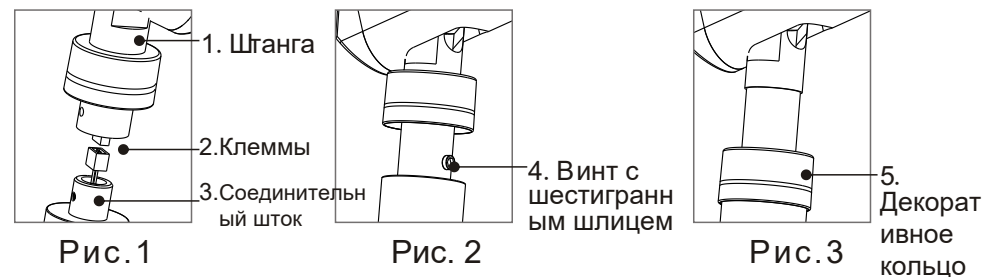

Метод сборки:

1. Наденьте декоративное кольцо на штангу светильника и надежно соедините коннекторы, как показано на рисунке 1;
2. Как показано на рис. 2, вставьте шток, соединяющий штангу и светильник, во внутреннее отверстие штанги, выровняйте отверстия под винт, затяните винт отверткой;
3. Согласно рисунку 3, опустите декоративное кольцо так, чтобы закрыть винт.

## 4. Условия среды

Условия работы		Условия транспортировки и хранения	
Температура	5°C~40°C	Температура	-40°C~50°C
Влажность	30%~80%	Влажность	≤85%
Атм. давление	30~75Кпа	Атм. давление	50~106Кпа

## 5. Технические параметры

Напряжение	AC 12-24V
Мощность	7 Вт
Освещенность в 0,7 м	8000 - 50000 люкс
Цвет. температура	4200 - 5200K (три режима)
Индекс цветопередачи	Ra > 90
Масса нетто	1.4 кг
Масса брутто	2.25 кг