

Руководство пользователя

VEO-X Цифровая интраоральная камера



Благодарим за покупку нашего продукта. Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой и использованием продукта.

Особенности устройства

- ◆ Сохранение изображений на карту памяти.
- ◆ Макрообъектив высокой четкости, специально для медицинского применения.
- ◆ Стоматолог может уделить больше внимания пациенту благодаря автофокусировке.
- ◆ Запатентованная технология передачи HD изображений без потерь.
- ◆ 17-дюймовый дисплей.
- ◆ Несколько режимов вывода изображения: полный экран, стоп-кадр, четыре снимка на экране, сравнение двух снимков.
- ◆ 6 светодиодов со стандартной цветовой температурой 5500 К для освещения. Поддерживается выключение светодиодов.
- ◆ Изменение цветовой гаммы изображения (теплый / стандартный цвет)
- ◆ Поддерживается загрузка снимков по QR коду.


Характеристики

Наименование	Стоматологическая интраоральная камера VEO-X
Электропитание	220 В
Входная мощность	4.5-5.5 ВА
Автофокус объектива	15 мм ~ 30 мм
Рабочее расстояние	18-25 мм
Длина провода	3.4 м
Длина кабеля ручного блока	2 м
Формат изображения	JPEG
Угол обзора	62°
Сенсор визуализации	1/4 CMOS сенсор
Разрешение	1280*960
Экран монитора	17 дюймов
Объектив камеры	Макрообъектив высокой четкости
Подсветка	6 светодиодов с функцией выключения
Кнопки ручного блока	Силиконовая панель с клавишами

Комплектация

Монитор		Штатив для ручного блока с винтами	
Ручной блок		Пульт управления	
Кабель ручного блока		Карта памяти (8 ГБ)	
Адаптер 220 В		Карт-ридер	
(Опцио- нально)			
Адаптер 24 В		Чехлы (50 шт.)	

Ручной блок

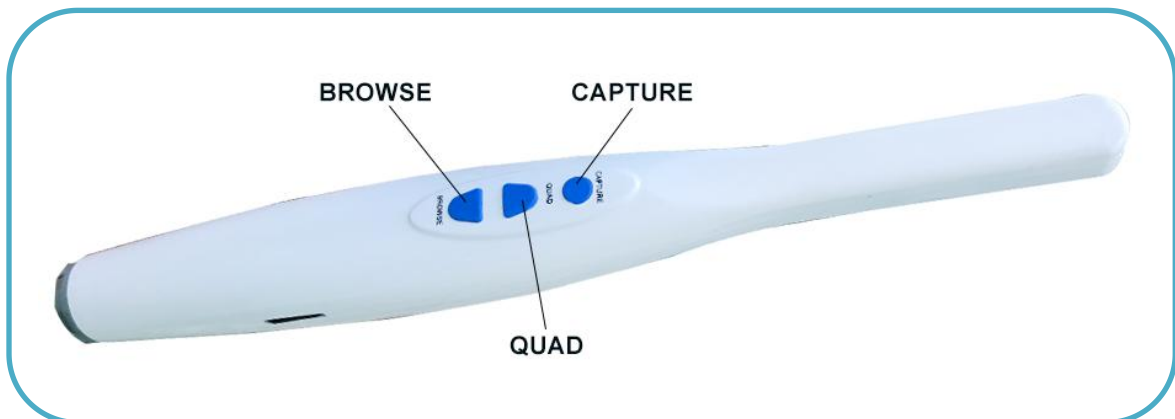

1. Включение и автоматический запуск

Экран запуска открывается за 10 с, затем открывается полноэкранный просмотр.

2. Кнопка **CAPTURE**

- 1) Нажмите **CAPTURE** для полноэкранного стоп-кадра
- 2) Нажмите **CAPTURE** снова, чтобы сохранить изображение на карту памяти, затем устройство вернет полноэкранный просмотр.
- 3) Во время стоп-кадра нажмите **QUAD**, камера включит двойной экран сравнения. Выйти из этого режима можно длительным нажатием **BROWSE**.
- 4) Во время стоп-кадра нажмите **BROWSE**, чтобы убрать его.

Кнопка **QUAD**

- 1) Откройте полноэкранный просмотр, нажмите **QUAD** для перехода в режим четырех снимков, нажмите **CAPTURE**, чтобы сделать снимок, сфотографируйте еще раз после длинного нажатия **BROWSE**, нажмите **CAPTURE** снова для захвата снимка. Когда появится стоп-кадр из 4 снимков, нажмите **CAPTURE**, чтобы сохранить.
- 2) В режиме четырех снимков нажмите **QUAD**, чтобы вернуться в полноэкранный просмотр.

4. Кнопка BROWSE

- 1) Откройте полноэкранный просмотр, нажмите **BROWSE**, чтобы перейти в режим поиска изображений.
- 2) Листайте снимки, нажимая **QUAD** и **BROWSE**.
- 3) В режиме поиска изображений удержите нажатой **QUAD**, чтобы выбрать рисунок, и еще раз нажмите **QUAD**, чтобы удалить его.
- 4) Чтобы закрыть меню поиска, удержите нажатой **BROWSE**, откроется вновь полноэкранный просмотр.


5. Управление светодиодом камеры (вкл/выкл)

В режиме полноэкранного просмотра удерживайте **BROWSE**, чтобы выключить светодиод, повторите нажатие **BROWSE**, чтобы включить LED.

6. Поставьте ручной блок в штатив, камера перейдет в спящий режим. Снимите его со штатива, чтобы камера заработала вновь.

7. При бездействии камеры в течение 5 мин, даже если она не находится на штативе, камера перейдет в спящий режим. Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить работу.


8. Лучшее расстояние съемки - 2 см. Полный экран с 2~4 зубами будет наиболее четким.

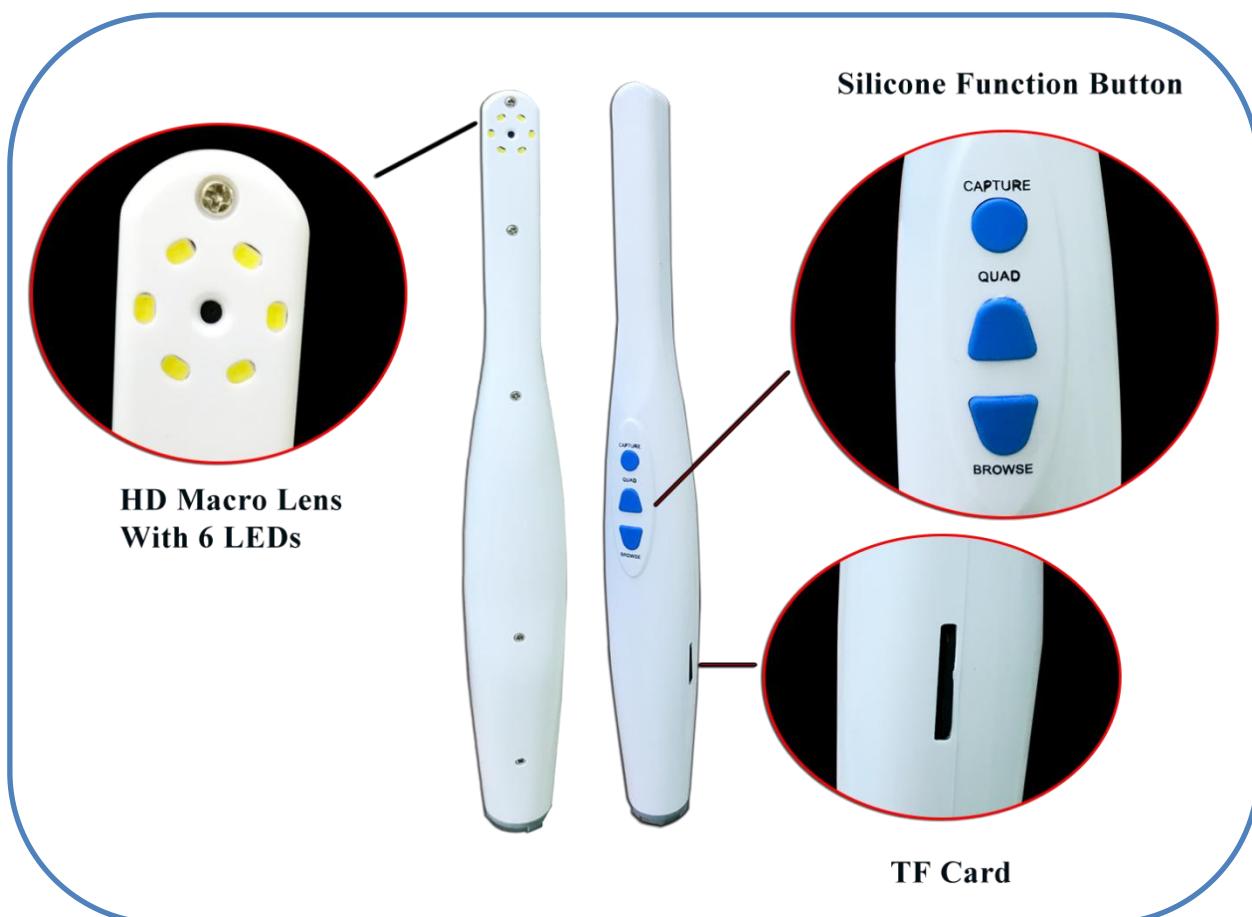

17-дюймовый монитор (спереди)



17-дюймовый монитор (сзади)

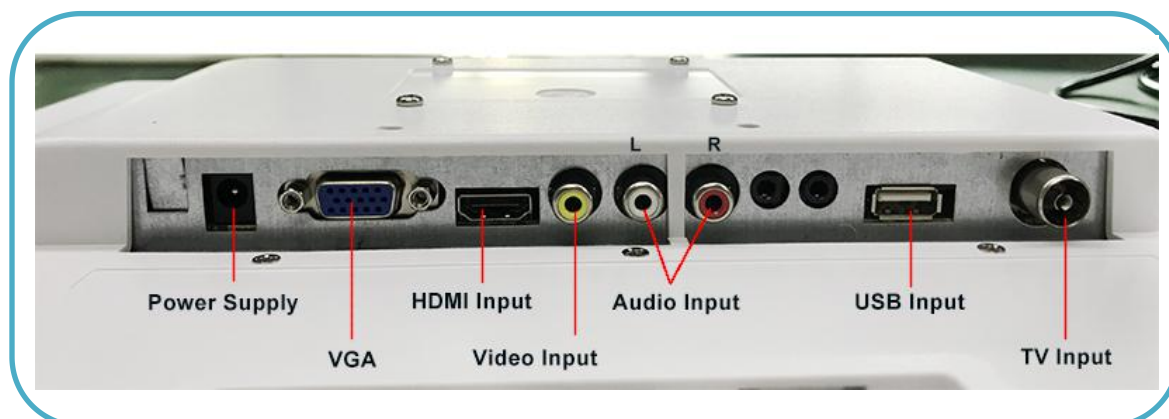



Как смотреть видео



* Просмотр видео с USB или карты памяти: **INPUT→MEDIA**

* Обрато к интраоральной камере: **INPUT→PC**

Как загрузить снимки зубов



Wifi Name

1. В нижнем левом углу экрана будет показано название Wifi сети.
2. Найдите сеть Wifi на телефоне. Пароль по умолчанию: **12345678**
3. Wifi подключен успешно.
4. Нажмите **BROWSE**, чтобы перейти в режим поиска изображений
4. Нажмите **QUAD** для просмотра предыдущего изображения
5. Нажмите **BROWSE** для просмотра следующего изображения
6. Нажатием **CAPTURE** можно вывести QR-код текущего снимка на экран
7. Откройте мобильный браузер и отсканируйте QR-код, так вы сможете просмотреть снимок зубов на телефоне. Снимок можно сохранить на телефоне.