

JERRY®

L4

Стоматологический светильник

Руководство пользователя



**Перед монтажом и использованием внимательно
прочитайте данное руководство.**

1. Введение

1.1 Благодарность

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор стоматологического светильника L4!

1.2 Введение

Устройство имеет комфортный свет, высокую яркость, низкое энергопотребление и длительный срок службы.


Светильник свободно вращается в трех осях, что обеспечивает самое удобное пользование во время процедуры.

1.3 Примечание


Инструкция является частью стоматологического светильника, сохраните ее для последующих обращений. Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте её, содержите и очищайте светильник согласно инструкциям.

2. Предупреждение

Соблюдайте базовые меры безопасности, чтобы снизить риски повреждения оборудования, ударов током, возгораний и травм при эксплуатации устройства.

 Не включайте устройство во время очистки и обслуживания.

 Не кладите и не вещайте ничего сверху на устройство.

 Не разбирайте продукт самостоятельно, чтобы избежать риска удара током. Если заметили нарушение в работе, своевременно обратитесь к дилеру в регионе.

3. Область применения

Устройство применяется в стоматологических клиниках для освещения полости рта пациента. Оно должно использоваться квалифицированными специалистами.

4. Яркий свет

LED источник излучает свет высокой интенсивности, нужно избегать попадания прямого света в глаза. Смотреть прямо на светильник безопасно в течение короткого

времени.

5. Электромагнитная совместимость


Стоматологическое оборудование имеет встроенные защитные меры в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).

Портативное и мобильное радиочастотное оборудование может вызывать помехи у стом. светильника. Поэтому не следует пользоваться мобильным телефоном рядом со светильником.

6. Составные части устройства




7. Монтаж

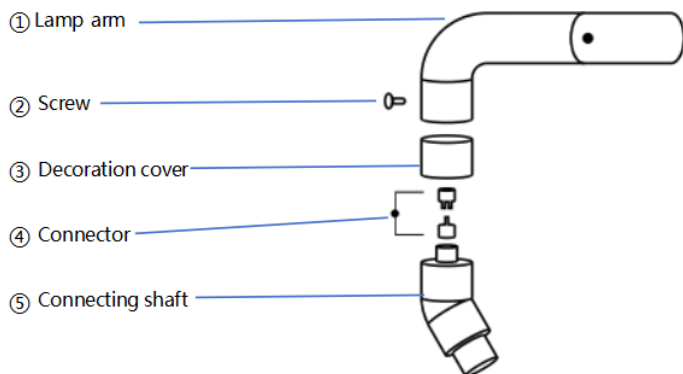

Соедините штангу светильника, декоративное кольцо и коннектор, как показано на рисунке.


8. Инструкции по эксплуатации

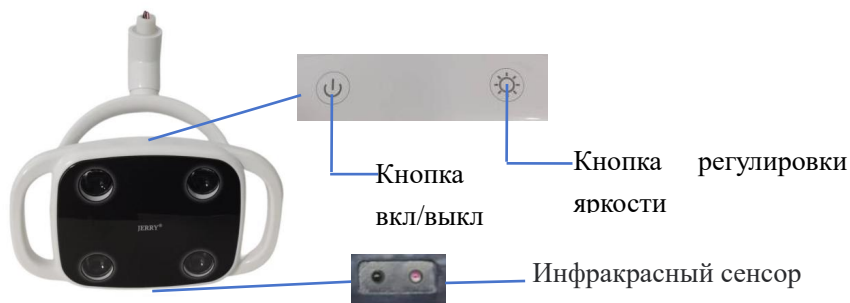


Управление светильником осуществляется с сенсорной панели и ИК-сенсора. Сенсорные кнопки находятся сверху светильника, а ИК-сенсор – снизу.

8.1 Включение и выключение светильника

При выключенном светильнике проведите рукой под


ИК-сенсором или коснитесь кнопки , чтобы включить его.

Когда светильник включен, проведите рукой под ИК-сенсором или коснитесь кнопки , чтобы выключить его.

8.2 Регулировка яркости

Яркость белого света можно настраивать в пределах от 6000 люкс до 32000 люкс.

8.3 Настраиваемая яркость

А. Кнопка  управляет яркостью.

При достижении максимальной яркости устройство подаст звуковой сигнал.

При понижении яркости до минимальной устройство подаст звуковой сигнал.

В. ИК-сенсор также используется для управления яркости.

Задержите руку под сенсором – светильник перейдет в режим регулировки яркости.

Наблюдайте за освещенностью, уберите руку, когда она станет подходящей.

Цветовая температура в режиме регулировки яркости не меняется.

8.4 Очистка и обслуживание

Персонал должен регулярно очищать и обслуживать светильник для обеспечения стабильной работы и безопасности. Протирайте поверхность светильника мягкой тканью и нейтральным моющим средством. Не используйте для очистки агрессивные дезинфицирующие средства.

9. Технические характеристики

Светильник L4 разработан, произведен и испытан в соответствии с государственным стандартом YY/T1120-2021 (ISO9680:2014, MOD).

Модель	L4
Входное напряжение	AC12V-24V
Мощность	<12 Вт

Освещение	4 белых светодиода
Цветовая температура	6000K
Освещенность	6000-32000 люкс
RA	≥ 90
Управление	Сенсорные кнопки и инфракрасный сенсор
Степень влагозащиты	IPX0
Рабочий режим	Непрерывный
Условия рабочей среды	Температура воздуха: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ Отн. влажность $\leq 80\%$
Условия хранения и транспортировки	Температура среды: $-40^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$ Отн. влажность: $\leq 93\%$
Масса-нетто	1.35 кг
Размер упаковки	375*380*110 мм

Производитель:

FOSHAN JERRY MEDICAL APPARATUS CO., LTD

Адрес: 2 Floor, NO.1 Flat, Mubei Industry Centre, Foshan,
Guangdong, China

Тел.: 0086-757-8663 7775 mail: elise@jerrymed.com

Вебсайт: www.jerrymed.com